

An allen Stationen und Bereiche

KRH ZENTRALAPOTHEKE

Leitung:

Dr. rer. nat. Thomas Vorwerk, M.A.
Chefapotheker

Zeichen: Fr
Durchwahl: 0511 927-6605
Telefax: 0511 927-6615
E-Mail: nadine.freerk@krh.eu

Datum: 25.10.2017

Fehlerpotential bei Handhabung der Clexane®-Fertigspritzen mit Sicherheitssystem

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir wurden von der Arbeitssicherheit darauf aufmerksam gemacht, dass es bei Applikation der Clexane®-Fertigspritzen (INN: Enoxaparin) zu Fehlern bei der Anwendung kommt.

Wenn der Kolben der Clexane®-Fertigspritze nicht bis zum Anschlag durchgedrückt wird, kann das Sicherheitssystem, welches die Nadel nach Ende der Applikation mit einer Schutzhülle versieht, nicht ausgelöst werden. Dies stellt eine Gefährdung des Personals hins. Nadelstichverletzungen dar.

Zudem bekommt der Patient nicht die vorgesehene Dosis an Enoxaparin; dies kann zu schwerwiegenden Zwischenfällen, wie z.B. Thrombosen, führen.

Bitte beachten Sie die beiliegende Anleitung und informieren Sie Ihre Kolleg/innen und Mitarbeiter/innen.

Die Anleitung finden Sie auch im Intranet (Apotheke/ Arzneimittelinformation).

Bei Fragen stehen wir gern unter der Telefonnummer 0511/927 6602 zur Verfügung.

Ihr Zentralapothekenteam

KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH | WWW.KRH.EU

KRH KLINIKUM AGNES KARLL LAATZEN | KRH KLINIKUM GROSSBURGWEDEL | KRH KLINIKUM LEHRTE | KRH KLINIKUM NEUSTADT AM RÜBENBERGE | KRH KLINIKUM NORDSTADT | KRH KLINIKUM ROBERT KOCH GEHRDEN MIT KRH NOTFALLAUFNAHME SPRINGE | KRH KLINIKUM SILOAH-OSTSTADT-HEIDEHAUS | KRH GERIATRIE LANGENHAGEN | KRH PSYCHIATRIE LANGENHAGEN | KRH PSYCHIATRIE WUNSTORF | KRH AMBULANT GMBH | KRH LABOR GMBH | KRH SERVICEGESELLSCHAFT MBH

SITZ DES UNTERNEHMENS: KLINIKUM REGION HANNOVER GMBH, CONSTANTINSTR. 40, 30177 HANNOVER

GESCHÄFTSFÜHRER: MICHAEL BORN, DR. MATTHIAS BRACHT, DIPL.-KFF. BARBARA SCHULTE

VORSITZENDER DES AUFSICHTSRATS: REGIONSPRÄSIDENT HAUKE JAGAU | HRB 62063 | AMTSGERICHT HANNOVER | UST-IDNR.: DE 814473695

BANKVERBINDUNG: SPARKASSE HANNOVER | IBAN: DE67 2505 0180 0000 2574 00 | BIC: SPKHDE2HXXX

Sicherheitsspritze

INJEKTIONSANLEITUNG

EINFACHE VORBEREITUNG



- 1 Desinfizieren Sie die gewählte Einstichstelle mit einem Alkoholtupfer.



- 2 Ziehen Sie die Sicherheitskappe gerade von der Nadel ab. Tropfen von der Nadelspitze abschütteln, nicht abstreifen.



- 3 Bilden Sie an der desinfizierten Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger eine Hautfalte.

EINFACHE INJEKTION



- 4 Führen Sie die Nadel senkrecht in einem Winkel von 90 Grad ein. Wichtig ist, dass die gesamte Dosis verabreicht wird, damit der automatische Schutzmechanismus aktiviert wird.



- 5 Ziehen Sie die Nadel langsam heraus. Dabei schiebt sich die Schutzhülle automatisch über die Nadel und schließt diese ein. Erst dann die Hautfalte loslassen.



- 6 Die Spritze lässt sich nun gefahrlos entsorgen.

Ein Service von



sanofi aventis

Das Wichtigste ist die Gesundheit